


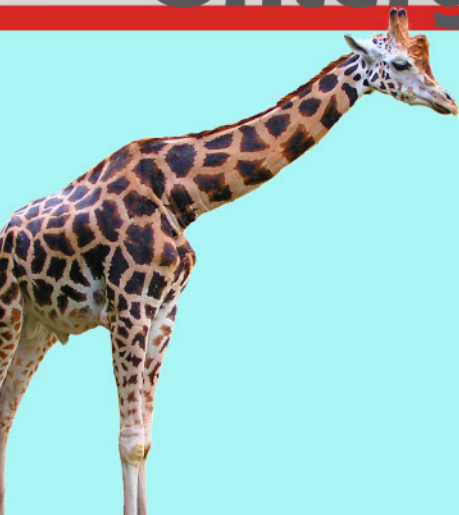

## Untergestell „Bunny 1“



... verbindet Sicherheit  
mit Flexibilität  
und Stabilität!

# Untergestell „Bunny 1“



**... verbindet Sicherheit mit Flexibilität und Stabilität!**



Das „Bunny 1“ Zimmerfahrgestell ist als Sitzschalengestell konzipiert und eignet sich zur Aufnahme der verschiedenen Sitzschalensysteme.

Durch seinen großen Höhenverstellbereich ist es besonders zum Einsatz bei Kindern geeignet, deren Sitzhöhe häufig variiert werden muss. Hier lässt sich die Sitzschale durch die Höhen- und Schrägverstellung für viele notwendige Gegebenheiten, z.B. unterschiedliche Tischhöhen, anpassen.

Das Bedienelement für die Verstellungen ist am Seitenrahmen angebracht und wird mit dem Fuß bedient. So bleiben die Hände frei, um die Schale zu verstellen und dabei dem Kind die notwendige Sicherheit zu geben. Zudem sind die Verstellhebel immer frei zugänglich - unabhängig, welche Höhe die Sitzschale gerade einnimmt, bzw. wie groß die Sitzschale ist.

Das Zimmerfahrgestell ist mit 4 Laufrollen, davon zwei mit Doppelstop, ausgestattet. Durch die Verwendung des Bausatzes „Schiebegriff“ wird „Bunny 1“ zum idealen Gerät für die Einrichtung oder für zu Hause. Der Schiebegriff lässt sich in der Höhe und Neigung den Bedürfnissen der Begleitperson anpassen.

In Kombination mit dem Bausatz „Luftbereifte Räder“ lässt sich das „Bunny 1“ problemlos im Garten oder auf der Terrasse benutzen, da es dann über 12“ große Hinterräder verfügt.

Das Zimmerfahrgestell „Bunny 1“ ist ausschließlich für die Benutzung mit Hilfe einer Begleitperson bestimmt und wurde entsprechend vom TÜV geprüft und besitzt eine Hilfsmittelnummer.



**Bunny 1 mit Zimmerrollen und Schiebegriff**




**Bunny 1 mit 12“-Rädern, Trommelbremsen und Schiebegriff**


der TÜV Produkt Service hat die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen entsprechend der Prüfpezifikationen  
**EN 12183: 1999**  
 &  
**EN 12183: 1999**  
 geprüft



**Namensdruck für leichte Identifizierung**

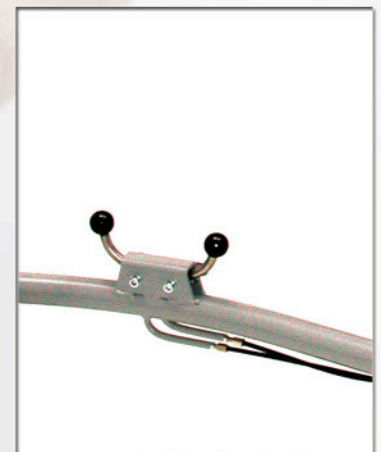

**Auslösehebel für Sitzhöhe und -winkel**

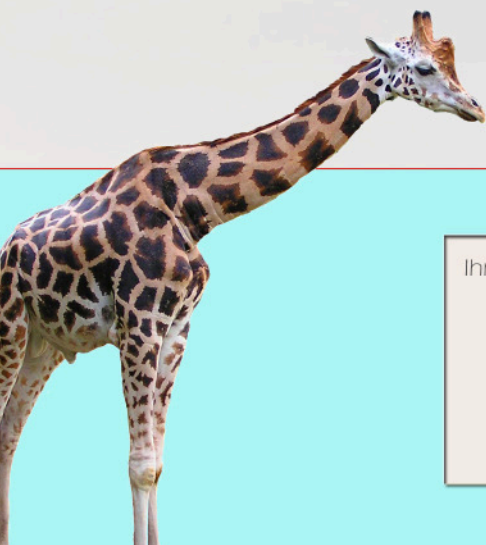

Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH  
 Partenhäuserweg 14  
 81369 München  
 ☎ +49 (0)89-7144176  
 ☎ +49 (0)89-78069309  
 Bodenseestraße 25  
 83059 Kolbermoor  
 ☎ +49 (0)8031-2068044  
 ☎ +49 (0)8031-2069215  
 ✉ info@hernik.de  
 🌐 www.hernik.de  
 Ust.-IdNr: DE201281298